



Bezwonny



Bez alkoholu



Bezpieczny



**Nowy standard ochrony
w sektorze zdrowia
BEZ etanolu**





Kluczowe cechy

- kompatybilność materiałowa
- brak substancji zapachowych
- bezbarwny
- ekonomiczny

Kluczowe zastosowania



Medyczna dezynfekcja powierzchni bez etanolu

- powierzchnie i urządzenia wrażliwe na działanie alkoholu, t.j. wyroby ze sztucznej skóry, inkubatory, łóżka, sprzęty elektroniczne, USG, pompy
- duże powierzchnie podłogi, ściany, blaty, poręcze
- drobne sprzęty stoliki, główce
- miejsca trudno dostępne, kanały, odpływy



Higieniczna dezynfekcja rąk bez etanolu

- do skóry rąk
- bez zapachu, dodatków oraz osadu
- nawilżająca
- w teście EN 1500 produkt wykazał istotnie lepsze działanie od środka wzorcowego Isopropanol 60%
- badanie alergologiczne
- dobrze tolerowany przez skórę
- nie stwierdzono żadnych podrażnień ani odczynów alergicznych

Kluczowi klienci

placówki szpitalne państwowe, placówki medyczne prywatne, opieka senioralna, fizjoterapia, kosmetyka, placówki medyczne izolowane

Kluczowe formy aplikacji

opryskiwanie, pianowanie, zanurzanie, zamaczanie, zmywanie



Dostępny w formie płynu lub piany

Zalecane miejsca zastosowania

Oddziały noworodkowe

Delikatna piana bez zapachu i koloru, przebadana dermatologicznie.

Leczenie ran

Bez etanolu, bez alkoholu, przebadany dermonatologicznie

Neutralizacja zapachów

Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, wnika w trudno dostępne szczeliny powierzchni.

Pion żywienia

Do powierzchni mających i nie mających kontaktu z żywnością

Onkologia

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka

Opieka senioralna

Bezpieczny

Uzależnienia

Nie naraża na zapach etanolu

Sprzęty i małe powierzchnie

Szybkie działanie

Duże powierzchnie, podłogi

Ekonomiczny, łatwy w użyciu, bez rozcieńczania

Skuteczność mikrobiologiczna



Bakteriobójczy EN 1276 1 minuta, 13727 1 minuta

Pseudomonas aeruginosa, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*, *Salmonella enterica*, *Listeria monocytogenes*, *Legionella pneumophila*.



Drożdżakobójczy EN 1650 1 minuta, EN 13624 1 minuta

Candidia albicans



Wirusobójczy EN 14476 1 minuta

Skuteczny przeciwko wszystkim wirusom z grup poniżej, powodujących kontaminację instrumentów medycznych, rąk oraz powierzchni medycznych poprzez:

- **Krew**
Filoviridae Hepatitis C virus (HCV), Flavivirus Hepatitis Delta virus (HDV), Herpesviridae, Human Immunodeficiency Virus (HIV), Hepatitis B virus (HBV), Human T Cell Leukemia Virus (HTLV).
- **Drogi oddechowe**
Coronavirus, Influenza Virus, Herpesviridae, Paramyxoviridae, Rubella Virus.
- **Tkanki nosa, oczu i uszu**
Herpesviridae, Human Immunodeficiency Virus (HIV), Measles Virus, Rabies Virus, Rubella Virus.
- **Drogi pokarmowo jelitowe**
Coronavirus. Skóra, piersi, mleko: Herpesviridae, Human T Cell Leukemia Virus (HTLV), Human Immunodeficiency Virus (HIV), Poxviridae.
- **Śledziona i węzły chłonne**
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV), Human Immunodeficiency Virus (HIV).
- **Procedury dentystyczne**
Herpesviridae, Hepatitis C Virus (HCV), Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis Delta Virus (HDV), Human Immunodeficiency Virus (HIV).
- **Drogi urogenitalne**
Hepatitis B Virus (HBV), Human T Cell Leukemia Virus (HTLV), Herpesviridae, Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Co działa w produktach z linii proSAVE?

- czwartorzędowe sole amonowe w najmniejszym możliwym stężeniu
- silne właściwości biobójcze
- dyfrakcja w błonie komórkowej patogenów
- zakłócają funkcje życiowe komórek patogennych
- proces powoduje śmierć komórek patogennych
- atom azotu połączony z czterema grupami organicznymi
- skuteczność w neutralizowaniu bakterii, wirusów, grzybów oraz alg
- destabilizacja błon lipidowych
- doprowadzają do lizy komórek patogennych
- działanie na białka wirusowe uniemożliwiające wirusowi zainfekowanie komórek gospodarza

Dlaczego proSAVE?

- zminimalizowanie dawki do skutecznie działającej
- aplikacja na skórę
- aplikacja na powierzchnie
- aplikacja na powierzchnie mające kontakt z żywnością
- polski producent

Sektory uzupełniające



Spożywczy

produkcja, przetwórstwo, kuchni przy zakładowych



Publiczny

szkoły, przedszkola, służba więzienna, sytuacje klęsk żywiołowych



Badania i certyfikaty: Decyzja Rejestracyjna Prezesa Urzędu Rejestracji Leków Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla linii produktów proSAVE

Decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych linia proSAVE została zarejestrowana w kat. 1, gr. 1, kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 4 wg załącznika V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012 r., str. 1, z późn. zm.); Ciecz, produkt dezynfekcyjny, posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze przeciwko grzybom drożdżopodobnym oraz ograniczone działanie wirusobójcze przeciwko wirusom otoczkowym. Przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czystą wodą powierzchni i urządzeń w obszarze medycznym, w przemyśle spożywczym, w obiektach użyteczności publicznej oraz do higienicznej dezynfekcji rąk.



Dezynfekcja bez etanolu

Zawiera czwartorzędowe sole amonowe w niskim stężeniu

Czy można zastąpić etanol?

	✓ PoSave BEZ ETANOLU	✗ ETANOL
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny	✓ Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska	✗ Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami. Skin Corr. 1, H314, Eye Dam. 1, H318, Aquatic Chronic 3, H412
2.2 Elementy oznakowania	✓ Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze: Nie ma. ✓ Nazwy niebezpiecznych komponentów wymienione na etykiecie: Nie ma. ✓ Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Nie ma. ✓ Zwroty wskazujące środki ostrożności: Nie ma.	✗ Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia ✗ H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary ✗ H319 Działa drażniąco na oczy ✗ Zwroty wskazujące środki ostrożności ✗ Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie ✗ P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić ✗ Zwroty wskazujące środki ostrożności ✗ P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty ✗ Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie ✗ P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
2.3 Inne zagrożenia	✓ Komponenty produktu nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH ✓ Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających ✓ Funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %	✗ Działanie mutagenne na komórki rozrodcze ✗ Toksyczność ostra
Ochrona oczu	✓ Nie jest wymagane	✗ Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Zagrożenia termiczne	✓ Nie występują	✗ Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową
Ochrona dróg oddechowych	✓ W przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana.	✗ Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę



beprosave-shop.com

poznaj proSAVE – nowy standard DEZYNFEKCJA bez etanolu

Zapraszamy Cię, zostań częścią społeczności świadomej zmian i możliwości w dziedzinie dezynfekcji dla zdrowia. Jesteśmy firmą myślącą do przodu, uczestniczymy od 30 lat w rozwiązaniach higienicznych. W tym czasie rozwinęliśmy produkt, który może okazać się rewolucją w dziedzinie dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń bez dodatku etanolu.

Skorzystaj już teraz i poznaj proSAVE, używając go do dezynfekcji rąk lub do dezynfekcji wszystkich powierzchni i urządzeń w sektorze medycznym (z wyłączeniem strefy chirurgii). Główne cechy to kompatybilność materiałowa, brak substancji zapachowych, bezbarwny.

Zalecany do dezynfekcji inkubatorów, głowic, USG, pomp infuzyjnych, foteli zabiegowych i dentystycznych, łóżek szpitalnych, stolików do sprzętu, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych, wyrobów ze skóry i sztucznej skóry, podłóg, miejsc trudnodostępnych, dużych powierzchni.

Dziękujemy za rozważenie możliwości wspólnego podniesienia standardów higieny w sektorze medycznym. Liczymy na możliwość współpracy z Państwem.



- Lek. wet. Aleksandra Dobrzyńska
CEO Medipharm International sp. z o.o. sp.k
+48 602 108 369
- Dawid Dobrzyński
Project Manager
Klienci Kluczowi, Rozwój, Zarządzanie
Wydział Farmacji Warszawski
Uniwersytet Medyczny
+48 602 595 116
- Lek. wet. Józef Napierała
Senior Manager
Produkcja, Praktyka, Opinie
+48 602 510 498



**Dystrybucja oraz obsługa kontraktowa
sektora szpitalnego**



Waldemar Biegalski

MDD Sp. z o. o.
87-100 Toruń / ul. Grudziądzka 159A

tel. +48 669 609 500 tel. +48 22 10 10 410

NIP: 956-227-05-60

email: waldemar.biegalski@mddpl.com

www.mddpl.com

Producent



Medipharm International sp. z o. o. sp. k.

ul. Emilii Sczanieckiej nr 20b 64-316 Kuślin

tel. +48 602 595 116

email: info@beprosave-shop.com

www.beprosave-shop.com